

## Kurzanleitung zur Durchführung der Elektrostimulationstherapie mit woundEL®

**Zusätzlich zur kontinuierlichen Wundbehandlung mit der woundEL®-Verbandelektrode wird 2mal täglich für 30 Minuten die Elektrostimulationstherapie mit dem woundEL®-Therapiegerät durchgeführt.**

**Zwischen den Behandlungseinheiten sollte ein zeitlicher Abstand von mindestens 6 Stunden eingehalten werden.**

1. Bringen Sie die Verbandelektrode laut Gebrauchsanweisung und geltendem Wundstandard auf die Wunde auf.
2. Bringen Sie die Disperserelektrode wundfern auf sauberer und intakter Haut an (ggf. Haare entfernen). Zwischen Verband- und Disperserelektrode sollte mindestens ein Abstand von 30 cm vorhanden sein. (Beispiel: Verbandelektrode auf der Wunde am Unterschenkel, Disperserelektrode am Oberschenkel des gleichen Beines applizieren.)
3. Schließen Sie die Verband- und Disperserelektrode mittels der farblich gekennzeichneten Kabel am Therapiegerät an.
4. Schalten Sie das Therapiegerät ein **(1)**. Direkt nach dem Einschalten führt das Therapiegerät einen Selbsttest durch.
5. Versichern Sie sich vor der Behandlung, dass der Akku (mindestens 2 volle Balken) aufgeladen ist. Bei sehr niedrigem Akku-Ladezustand (1 halber Balken) schaltet sich das Therapiegerät aus. Das Therapiegerät muss dann aufgeladen werden.
6. Mit der Start-Taste wird die 30 minütige Therapieeinheit gestartet **(2)**. Die verbleibende Behandlungszeit wird im Display dargestellt.
7. Erst wenn Sie die Start-Taste betätigen haben, stellen Sie die Intensität (mindestens 5 bis maximal 42 Milliampere) ein **(3)**. Die individuelle Sensibilität und Toleranz des Patienten entscheidet über die Höhe der Intensität. Der aktuelle Behandlungsstrom wird im Display angezeigt.
8. Während der Behandlung leuchtet auf der Frontseite des Therapiegerätes eine der vier LEDs gelb und zeigt so die einwandfreie Therapiedurchführung an.
9. Sollte die Therapie (ausschließlich und nur nach ärztliche Anordnung) auf eine positive Polarität eingestellt worden sein, drücken Sie jetzt die Taste +/- -Polarität **(4)** und bestätigen diese anschließend noch einmal durch erneutes Betätigen der Taste.
10. Nach Ablauf der 30 minütigen Therapieeinheit schaltet sich das Therapiegerät nach einem kurzen Signalton eigenständig aus.
11. Entfernen Sie die Elektrodenkabel von der Verbandelektrode und das Kabel der Disperserelektrode vom Gerät.
12. Ziehen Sie die Disperserelektrode vorsichtig von der Haut ab. Kleben Sie sie auf die Schutzfolie auf und legen Sie sie wieder in die verschließbare Verpackung zurück. Die Disperserelektrode kann bis zu 4 Wochen verwendet werden.



### Kurzanleitung zur Durchführung der Elektrostimulationstherapie mit woundEL®

