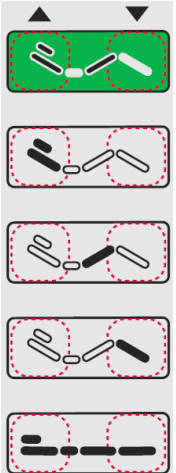








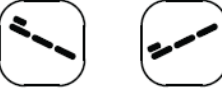

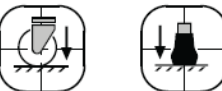










# Kurzanleitung GerroBed Bari

 <p>a) </p> <p>b) </p> <p>c) </p> <p>d) </p> <p>e) </p>	<p><b>Einstellen der Liegeflächenfunktionen</b> (Handschalter kann dem Patienten nach Einweisung überlassen werden)</p> <p>a) <b>Grüne Taste</b> Zur Erzielung eines optimalen Sitz-/Liegekomforts werden Rücken- und Oberschenkelteil gleichzeitig angehoben.</p> <p>b) <b>Rückeneinstellung</b></p> <p>c) <b>Oberschenkeneinstellung</b></p> <p>d) <b>Einstellung des Fußendes</b> Das Fußende wird angehoben, ggfs. erfolgt eine Absenkung der Oberschenkel</p> <p>e) <b>Höhenverstellung der Liegefläche (44 - 88 cm)</b></p>
	<p><b>Einstellen der Liegeflächenbreite</b></p> <p> Personalhandschalter. Darf dem Patienten nicht überlassen werden!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matratzenbreite verstellbar von 90 - 120 cm.</li> <li>- Äußere Breite verstellbar von 101 - 131 cm.</li> <li>- Die Breite ist dem Bedarf des Patienten anzupassen.</li> </ul> <p> Beim Ein- /Aussteigen über die Seite, ist zuerst immer die Liegeflächenbreite auf die schmalste Position zu stellen. Bei Verwendung luftgefüllter Matratzensystemen ist zum Zusammenfahren Luft abzulassen.</p>
<p>a) </p> <p>b) </p> <p>c) </p> <p>d) </p>	<p> Personalhandschalter. Darf dem Patienten nicht überlassen werden!</p> <p>a) <b>Trendelenburg / Antitrendelenburg</b> Z. B. einsetzbar für eine komfortable Sitzposition</p> <p>b) <b>Ein- und Aussteigen am Fußende</b> Ermöglicht dem Patienten, über das Fußende ein- bzw. aussteigen. Entfernen Sie zunächst das Fußenteil. Durch Drücken der <i>Aussteige</i>-Taste (rechts) fährt die Liegefläche in Sitzposition. Danach senkt sich das Fußende ganz ab. Der Patient kann das Bett über das Fußende verlassen. Weitere Betätigung der <i>Aussteige</i>-Taste hebt das Fußende an, und hilft dem Patienten in stehende Stellung zu kommen. Durch Betätigung der <i>Einstiegsfunktion</i> (links) erfolgt eine Absenkung in entgegengesetzter Reihenfolge.</p> <p> Achten Sie sowohl auf den Patienten als auch auf das Bett. Das Aussteigen lässt sich jederzeit durch ein Loslassen der Taste unterbrechen.</p> <p>c) <b>Räder / Beinlift</b> Die Funktionen sind mit einer einzelnen Betätigung zu aktivieren. Bis zur völligen Erreichung der Endposition piept die Schaltbox. Betätigen Sie <i>Bein abwärts</i> (rechts), um das Bett sicher auf seine 4 Beinen zu stellen. Betätigen Sie <i>Rad abwärts</i>, um mit dem Bett fahren zu können.</p> <p> Versichern Sie sich nach einem Transport, dass das Bett fest auf allen Beinen steht, und dass alle Räder in die höchste Stellung gefahren worden sind.</p> <p>d) <b>Planebene / Senkfunktion - CPR-Taste</b> Alle Funktionen werden auf die niedrigste Ebene gesenkt.</p>

# Kurzanleitung GerroBed Bari

## Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung lesen und befolgen

<b>Anwendung</b>	Das GerroBed Bari wurde für die Bariatrie entwickelt und für die Handhabung von Personen mit einem Gewicht von bis zu 400 kg und einer Nennlast von 450 kg (SWL) entwickelt.
<b>Sicherheitsbestimmungen</b>  	<p><b>⚠ Mögliche Gefahren und wie man sie vermeidet.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei der manuellen oder elektrischen Bedienung des Bettes besteht Klemmgefahr zwischen den beweglichen Teilen. Achten Sie darauf, dass niemand beim Anheben des Bettes eingeklemmt wird.</li> <li>- Achten Sie beim Einsatz der Handbedienung immer auf das Bett. Stellen Sie sicher, dass niemand während der Bedienung des Bettes eingeklemmt wird.</li> <li>- Kriechen Sie niemals unter das Bett.</li> </ul> <p><b>⚠ Fehlfunktion bei nicht erfolgter Wartung.</b> Die Wartungsintervalle sind einzuhalten. Die Benutzung eines defekten Bettes ist nicht zulässig.</p> <p><b>⚠ Überlastung.</b> Die max. zulässige Belastung des Bettes darf nicht überschritten werden - SWL 450 kg.</p> <p><b>⚠ Fehlbedienung.</b> Übergeben Sie die Handbedienung nur einer Person, von der Sie wissen, dass sie mit der Bedienung und den Funktionen vertraut gemacht worden ist. Befolgen Sie die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung.</p>
<b>Seitenteile / Stützgriffe</b>	Die Seitenteile / Stützgriffe sind in Liege- und Sitzposition sowie als Ausstiegshilfen und zur Mobilisation zu benutzen.
<b>Stirnseitenteile</b>	Entfernen Sie beim Aussteigen über das Fußende das Fußenteil durch Ziehen der unter dem Bettrahmen befindlichen Bolzen.
<b>Liegeflächenverlängerung</b>	Die Liegefläche ist am Fußende um 20 cm (von 210 – 230 cm) verlängerbar. Bei der Verlängerung ist das Festdrehen der Rändelschrauben sehr wichtig.
<b>Stromversorgung</b>	Befindet sich das Bett im Krankenzimmer, schließen Sie es immer an 230V an. (Für die Bettfunktionen ist eine voll aufgeladene Batterie wichtig.)
<b>Batteriefunktion</b>	Bei voll aufgeladener Batterie sind ca. 10 - 15 Bedienungsschritte möglich.
<b>Reinigen des GerroBed Bari</b>	Wischdesinfektion gemäß hauseigenem Hygieneplan für Elektrobetten. Verwenden Sie herkömmliche Reinigungsmittel oder eine 4 %ige Chlor- und 70 %ige Spirituslösung. Bett nach dem Reinigen trocknen. <b>ACHTUNG:</b> Nicht unter fließendem Wasser oder mit Hochdruckreinigern reinigen, nicht waschstraßentauglich.
<b>Mögliche Funktionsprobleme</b>   oder 	Eventuelle Funktionsprobleme lassen sich durch Nullstellen der Schaltbox beheben. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dies geschieht durch gleichzeitiges, ca. 10sekündiges Drücken der links abgebildeten Tastenkombinationen. Sollte durch eine Kombination keine Rückstellung erfolgen, verwenden Sie die andere.</li> <li>2. Piept die Schaltbox, befolgen Sie Schritt 1 bis die Schaltbox aufhört zu piepen.  Fahren Sie das Bett danach in die unterste Position.</li> </ol>
<b>Richtungssperre</b>	Treten Sie den Hebel für die Richtungssperre am Fußende des Bettes herunter, die Rollen fahren nun nur noch Geradeaus.
<b>Service und Wartung</b>	Es ist jährlich eine Inspektion durchzuführen.