

Gairomat PLUS[®]


NON-ENERGETISCHE
DRUCKENTLASTUNG FÜR
DEKUBITUSPROPHYLAXE
UND -THERAPIE BIS
MITTLEREM DEKUBITUS-
RISIKO

OPTIMALE PATIENTEN-
VERSORGUNG BEI
RESTMOBILITÄT UND
SCHMERZMANAGEMENT



SICHERE VERSORGUNG – WARTUNGSARM, PATIENTEN- UND BEDIENERFREUNDLICH

- Bedienerfreundlich und wartungsarm zur Druckentlastung von Risikozone
- Automatische Druckeinstellung auf das Patientengewicht
- Die abgeschrägte Fersenzone bietet eine gezielte Druckentlastung
- Trageschlaufen zum einfachen Handling des Matratzenkörpers
- Fixiergurte zur Befestigung des Matratzenkörpers am Patientenbett
- Der bi-elastische Schonbezug bietet die Möglichkeit zur Reduktion von Scherkräften, ist atmungsaktiv und flüssigkeitsundurchlässig

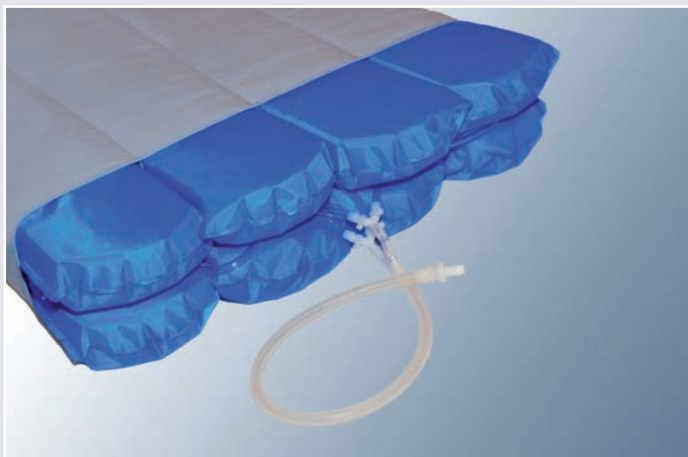

WIRKPRINZIP:

Ein kreuzlaufendes Schlauchsystem zwischen den 4 Kammern der oberen Lage und den 4 Kammern der unteren Lage sorgt für eine optimale Druckverteilung in den Kammern untereinander.

Die innenliegenden Kammern enthalten Schaumstoff, um die druckentlastende Wirkung des Systems jederzeit zu gewährleisten.

TECHNISCHE DATEN



Matratze

Abmessungen	200 x 88 x 17 cm (LxBxH)
Material	Polyester mit Polyurethan
Reinigung	Bezug waschbar bei 60 °C, Desinfektion mit DGHM gelisteten Desinfektionsmitteln
Gewicht	14 kg
Patientengewicht	bis 300 kg
Aufbau	Schaumstoff kombiniert mit 8 Luftzellen

© 2012 GerroMed Pflege- und Medizintechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle in dieser Produktinformation genannten Handelsmarken und Trademarks (TM) sind Eigentum von GerroMed und deren Lizenzgebern. Handelszeichen mit dem Symbol ® sind international registrierte und geschützte Warenzeichen. GerroMed-Produkte sind durch Patente geschützt. Diese Produktinformation ist zur Verteilung im deutschsprachigen Handelsraum bestimmt. Änderungen zu technischen und medizinischen Aussagen vorbehalten. Weiterführende Produktinformationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gebrauchsanleitungen. Stand der Informationen: August 2013

Wir sind zertifiziert
nach DIN EN ISO13485



DB/CP/11-14

GerroMed

GerroMed Pflege und Medizintechnik GmbH

Papenreye 55 · D - 22453 Hamburg · Telefon 040 / 54 73 03-0 · Fax 040 / 54 73 03-33 · www.gerromed.de · mail@gerromed.de